

MASK
REVER

TALLA
M


**MASCARILLA DE PREVENCIÓN,
REUTILIZABLE Y REVERSIBLE 2 EN 1**

MASCARILLA DE PREVENCIÓN LAVABLE, CUMPLIENDO CON ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UNE 0065:2020, MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES PARA ADULTOS Y NIÑOS.

PACK BURBUJA

CINCO COLORES, CINCO DÍAS DE LA SEMANA





IDENTIFICA TU GRUPO BURBUJA

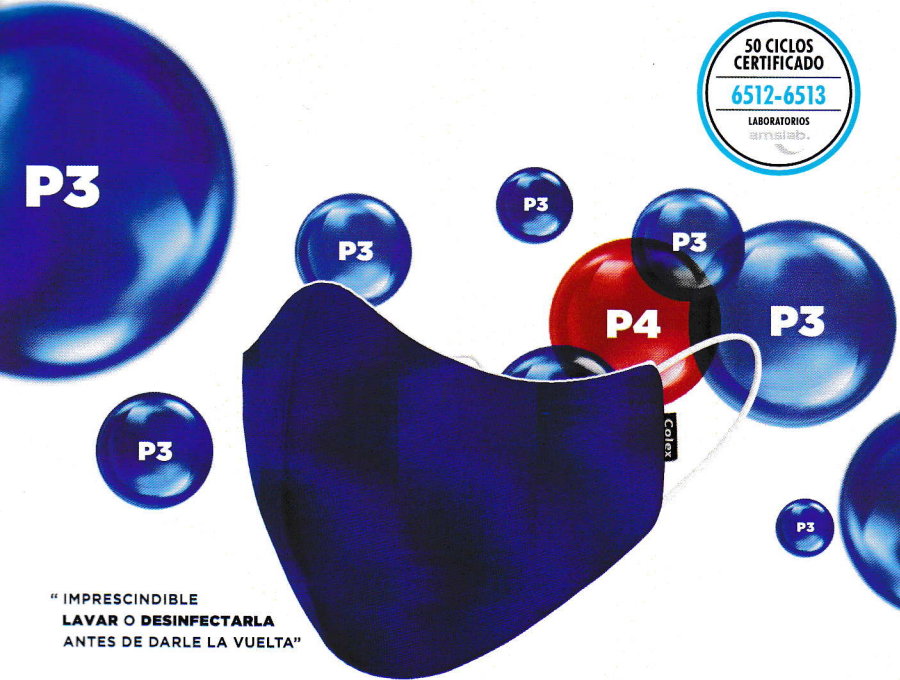

“IMPRESINDIBLE
LAVAR O DESINFECTARLA
ANTES DE DARLE LA VUELTA”

HASTA 50 LAVADOS

Filtración superior al 90%, respirabilidad menor a 25

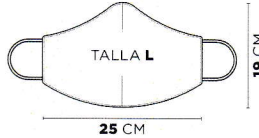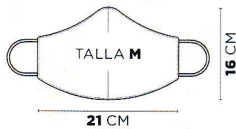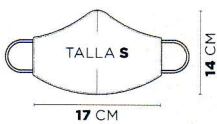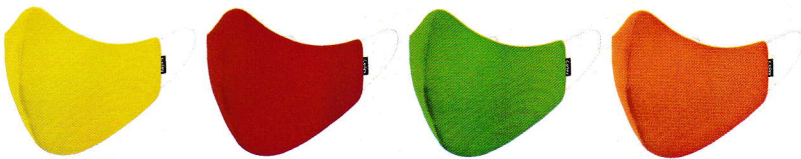

MODELO PATENTADO



CARACTERÍSTICAS

- Certificado: Según ensayo 2020TM0680/2020TM02481 realizado por laboratorios Aitex cumpliendo con la especificación UNE 0065:2020 sobre mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños.
- Certificado: Según ensayo 5246/47 realizado por laboratorios Amslab cumpliendo con la especificación UNE 0065:2020 y normativa europea CWA17553:2020 sobre mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños.
- Hasta 50 lavados: Cumplen con la norma UNE 0065:2020 y la norma europea CWA17553:2020 Level 90% con eficacia de filtración superior al 90% y una respirabilidad de <70.

RESULTADOS TEST LABORATORIO


REVER SIN SUBLIMAR (INFORME AMSLAB 20-006512)

- Original: BFE. 95,48 RES. 17,2
- 5 lavados: BFE. 95,26 RES. 21
- 10 lavados: BFE. 91,45 RES. 23,5
- 50 lavados: BFE. 90,6 RES. 19,2


REVER SUBLIMADA (INFORME AMSLAB 20-006513)

- Original: BFE. 95,84 RES. 45,8
- 5 lavados: BFE. 95,1 RES. 49,7
- 10 lavados: BFE. 90,25 RES. 51,1
- 50 lavados: BFE. 90,47 RES. 54,5

COMPOSICIÓN

- Capa exterior: 80% PES (Poliéster) 20% PA (Poliamida).
- Capa interior: 100% PES (Poliéster) hidrófugo, iones de plata (Tejido antibacteriano).
- Standard: 
- Hidrófugo: Sí, repele el agua y micro gotas.
- Antibacteriano: Sí
- Transpirable: Sí
- Material lavable: Sí, hasta 50 ciclos.

LAVADO

- Lavado y desinfección de las mascarillas con detergente normal y agua a temperatura de 60oC. (UNE- EN ISO 6330 programa 6N) (ciclo normal de lavadora) y secado al aire (UNE- EN ISO 6330: 2012, tipo A).
- Etiquetado de conservación UNE-EN ISO 3758:2012: 
- No utilizar lejía, no utilizar secadora, lavar por separado.
- Se recomienda el planchado a 110oC, con un máximo de 4 segundos.

INSTRUCCIONES DE USO

- 8 horas de uso continuado, es recomendable limpiar la mascarilla a diario.
- 4 horas de uso continuado, es recomendable limpiarla cada dos días.
- 1 o 2 horas de uso esporádico diario, no más de 3 o 4 días seguidos sin limpiarla.
- Imprescindible lavar/desinfectar antes de darle la vuelta.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN



ADVERTENCIA: Esta mascarilla es de uso personal.

"ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017 / 745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2017 / 745".

" La mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por el distanciamiento social que son esenciales, las medidas de protección colectiva son prioritarias sobre las medidas de protección individual "

Fabricado por COLEX UNIFORMES S.L. B63883961

www.revermask.com

Tel. 93 564 64 50
Barcelona (España)

